



MANUAL DE PERFURAÇÃO



A STUDEX

A **STUDEX** é uma empresa familiar, com sede em Los Angeles, Califórnia. A empresa foi fundada em 1978 e hoje em dia é líder e referência mundial na fabricação de brincos para perfuração de orelhas em aço inoxidável de grau cirúrgico. Atualmente contamos com uma rede de escritórios em mais de 70 países.

Os produtos STUDEX são testados e aprovados por ministérios de saúde internacionais e vendidos em todo o mundo, por isso é garantido o design clássico, reconhecido como a principal linha de equipamentos de perfuração disponíveis hoje em dia.

No **BRASIL** a STUDEX atua há mais de 25 anos e está presente na grande maioria das farmácias. Contamos com uma exclusiva logística de distribuição e temos escritórios em diversas capitais do país.

Nossos produtos são todos fabricados em aço inox cirúrgico e passam por um processo de esterilização que garante a máxima higiene e proteção. Além disso, nossos brincos são livres de níquel, o que reforça seu caráter antialérgico. Possuem um desenho com espessura, comprimento e diâmetro especialmente concebidos para garantirem a precisão na aplicação e ventilação adequada da área perfurada, para uma natural, segura e rápida cicatrização.

Toda a nossa linha atende as leis federais de saúde, nacionais e internacionais, estando devidamente regulamentado na ANVISA, FDA (Food & Drug Administration), e E.C (European Confederation).

Esse conjunto de qualidade que apresentamos faz com que nosso produto seja muito procurado pelos consumidores, não somente para realizar a perfuração da orelha, mas também para adquirir o produto como um brinco substituto ou para presentear.

VANTAGENS DO SISTEMA UNIVERSAL STUDEX

1 - O aparelho Studex possui um mecanismo interno para soltar o adaptador do êmbolo com facilidade. Além disso, um conjunto de Adapter Clip, em código de cores, está incluído no kit para facilitar a instalação e a remoção dos adaptadores. Veja as instruções de carregamento para mais detalhes.

2 - O aparelho anatômico Studex tem conforto para uma pegada confortável e equilibrada, para controle máximo. O aparelho foi criado para permitir que o operador tenha um alinhamento melhor com a orelha, para uma perfuração mais exata.

3 - Na posição “armada”, a ponta do pino fica mais perto da orelha do que em outros aparelhos. Isso permite que o operador posicione o brinco com mais precisão, para uma perfuração mais exata.

4 - Os adaptadores são coloridos para diferenciar entre tamanhos (fig. 1).

5 - As tarraxas se localizam no suporte de plástico, abaixo de cada brinco, para serem inseridas com mais facilidade no encaixe de tarraxa. Vale salientar que nossas tarraxas permitem uma maior ventilação da área perfurada, e com isso possibilita uma cicatrização mais rápida e com reduzido risco de infecção. Sua flexibilidade faz com que o brinco se acomode de forma perfeita, sendo indicado para adultos e crianças.

6 - Utilizado por mais de 40 anos, o aparelho Universal Studex sempre proporcionou uma perfuração livre de riscos graças ao seu padrão de qualidade. Compatível somente com brincos genuínos Studex.

Nomes dos componentes do aparelho e brincos

Adaptadores
e Grampos

Figura 1

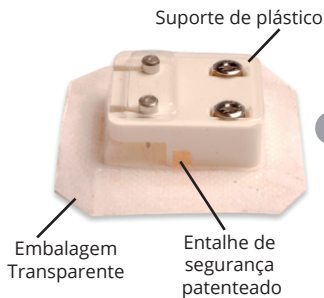
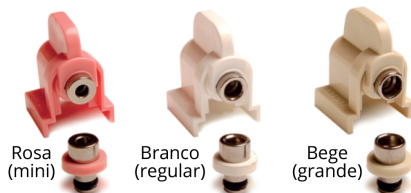


Figura 2

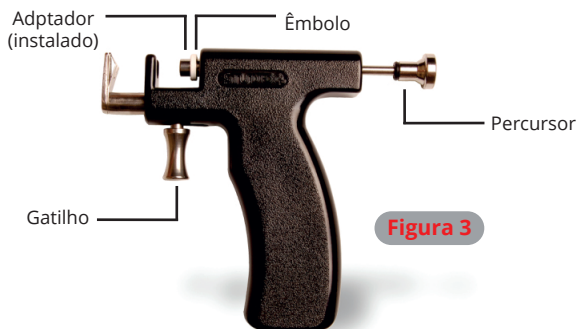
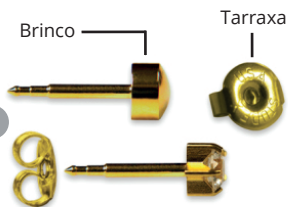


Figura 3

INSTRUÇÕES PARA FURAR ORELHA

A. Preparando o cliente

- 1 - Peça para o cliente escolher o modelo de brinco do display de exposição com Brincos Studex.
- 2 - O cliente deve ler, preencher e assinar o formulário Padrão de Autorização.
- 3 - Peça-o para sentar-se no local designado para a perfuração.

B. Preparando para a perfuração

Primeiro, se familiarize com o aparelho e os brincos embalados. É muito importante que você se apresente confiante, como um profissional, para o cliente. Quanto mais confortável estiver, mais à vontade o seu cliente vai se sentir. Isso vai ajudar o cliente a relaxar e aliviar a ansiedade que possa estar sentindo.

- 1 - Lave as duas mãos. Coloque luvas descartáveis ANTES de começar a perfuração.
- 2 - Verifique se há cistos na orelha do cliente. Quando você aperta a orelha e sente uma pequena e rígida protuberância, que pode se mexer, provavelmente é um cisto. Se você vê e sente uma protuberância que não se move, provavelmente é tecido de cicatriz (os cistos não ficam visíveis e podem ser movidos). **Você pode perfurar tecido de cicatriz, mas nunca um cisto, pois ele pode se romper e liberar debris no tecido em volta, o que causa infecção.**

C. Marcando as Orelhas

- 1 - Peça ao cliente para retirar outros brincos, se estiver usando;
- 2 - Limpe as orelhas do cliente com gaze esterilizada ou algodão umedecido com álcool 70°;
- 3 - Marque as orelhas com a Caneta de Marcação não-tóxica (veja a figura 4);
- 4 - Peça-o para verificar se concorda com as marcas ANTES de continuar. O cliente não pode tocar suas orelhas depois de limpas.



Figura 4

MANUSEIO DO APARELHO DE PERFURAÇÃO

Substituindo um Adaptador

Sem usar o Adapter Clip Studex

1 - Primeiro conferir qual é o adaptador necessário para os brincos que você está usando. Regular, Mini ou Grande.


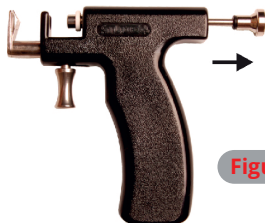


Figura 5




Figura 6

2 - Puxe o percussor todo para trás, mudando para a posição "armada" até que o êmbolo não possa mais ser puxado (Fig. 5). Desta forma, o adaptador poderá ser removido facilmente com os dedos (Fig. 6).

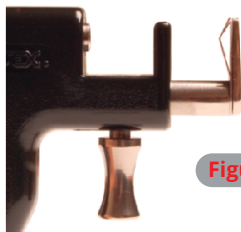

3 - Selecione o adaptador adequado para os brincos que você irá usar. Os adaptadores têm código de cor para facilitar a identificação (Fig.7):

Figura 7

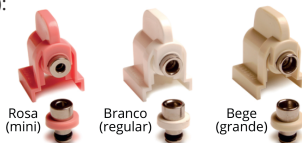

4 - Com o êmbolo na posição “armada”, pressione o adaptador na frente do êmbolo, até seu curso final (Fig.8).



Figura 8

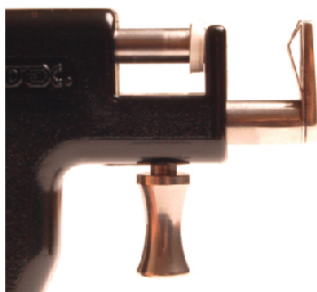


Figura 9

5 - Depois que o adaptador estiver colocado corretamente no êmbolo, puxe o gatilho para voltar o êmbolo até a posição “desarmada”.

MANUSEIO DO APARELHO DE PERFURAÇÃO

Substituindo um Adaptador

Usando o Adapter Clip Studex

Leia estas instruções com cuidado antes de usar o Adapter Clip para remover ou instalar o adaptador, prevenindo danos ao adaptador, ao Clip ou ao aparelho.

Removendo o Adaptador

1 - Certifique-se de que o aparelho não está armado.

2 - Coloque o Adapter Clip vazio sobre o êmbolo, como mostra a figura 10. Puxe o percussor para trás. O adaptador vai encaixar no eixo automaticamente.

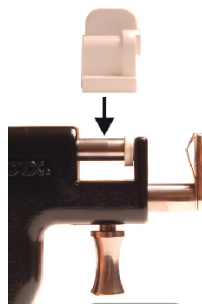


Figura 10

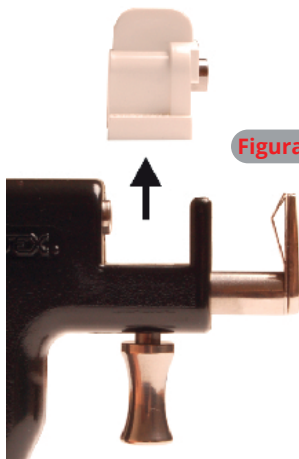


Figura 11

3 - Levante o Adapter Clip para fora do aparelho. O adaptador vai continuar no clip (Fig. 11).

DICA: Se você estiver usando o Adapter Clip para guardar os adaptadores, combine a cor do Clip com a cor da borda do adaptador. Isso torna a identificação do adaptador apropriado mais facilmente para a próxima operação de perfuração.

Instalando o Adaptador

1 - "Arme" o aparelho.

2 - Encaixe o adaptador apropriado no Adapter Clipe, conforme mostrado.

3 - Coloque o Adapter Clip (com o adaptador dentro) sobre o êmbolo, e encaixe-o na cavidade do aparelho (Fig. 12).

Figura 12

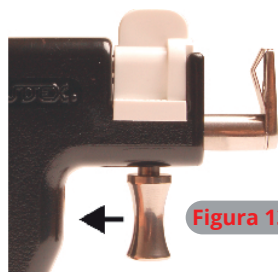
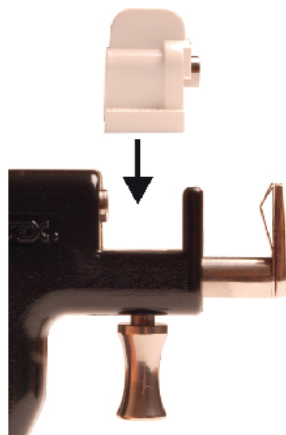



Figura 13


4 - Puxe o gatilho para soltar o êmbolo, fazendo assim com que o adaptador se encaixe (Fig. 13).

NÃO puxe simplesmente o gatilho e "atire" o êmbolo, pois danos ao adaptador, ao grampo ou ao aparelho podem levar o êmbolo a encaixar para frente.

5 - Depois que o eixo estiver totalmente para frente, retire o Adapter Clip (Fig. 14).

Figura 14

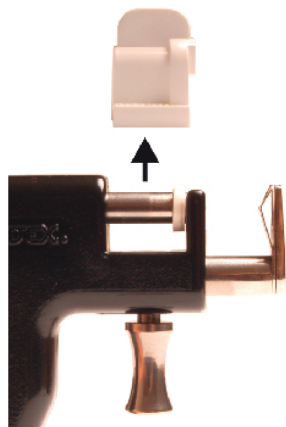

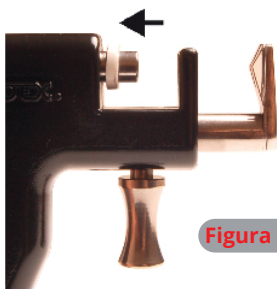

“Arme” o aparelho e pressione o adaptador com firmeza para certificar-se de que está bem colocado no eixo. O adaptador vai fazer um barulho de encaixe, quando for colocado de forma adequada (Fig. 15).

Figura 15

INSTRUÇÕES PARA FURAR ORELHA

Limpendo o aparelho


Antes e depois de cada perfuração, limpe totalmente a área de encaixe de tarraxa, limpando com algodão ou cotonete umedecido com álcool 70°.

Carregando o aparelho

1 - “Arme” o aparelho levando o percursor para trás até travar no lugar (Fig. 16).



Figura 16

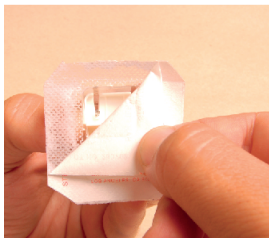

2 - Segure o papel traseiro e retire-o, expondo o suporte de plástico esterilizado com os brincos e as tarraxas. **NÃO TOQUE OS PINOS** depois de abrir a embalagem, ou a esterilização perde a eficácia (Fig. 17).

Figura 17

3 - Tomando cuidado para não tocar os pinos dos brincos, vire o suporte de plástico para cima com seu dedo indicador, para segurar os lados com o polegar e o dedo do meio. Retire o suporte da caixa esterilizada. Os brincos devem ficar na parte inferior e as tarraxas em cima (Figs. 18/19).

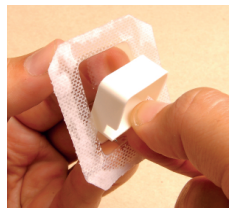


Figura 18

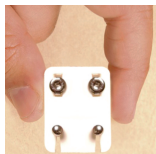


Figura 19

4 - Insira um brinco no adaptador e puxe o suporte em linha reta, para soltar o brinco do suporte (Fig. 20)

Figura 20



Figura 21



5 - Inverta a posição e mantendo o aparelho em posição reta, deslize a tarraxa correspondente (localizada logo acima do brinco) para dentro do encaixe apropriado, na extremidade do aparelho (Fig. 21).

INSTRUÇÕES PARA FURAR ORELHA



1 - Coloque a orelha entre o encaixe de tarraxa e o brinco, alinhando a ponta do brinco com a marca da orelha. Mantendo o alinhamento adequado, aperte o gatilho devagar, até que a orelha esteja seguramente presa pelo aparelho (Fig. 22)

Figura 22



2 - Continue a apertar o gatilho até soltar o êmbolo. Em menos de um décimo de segundo, a orelha é furada e a tarraxa é automaticamente encaixada no pino, com o espaçamento correto. (Fig. 23).

Figura 23



3 - Solte o gatilho e puxe o aparelho em linha reta para baixo, com cuidado (Fig. 24).

4 - Repita esse procedimento para outro(s) furo(s).

5 - Dê ao cliente as instruções sobre cuidados pós-perfuração, para ele levar para casa.

Figura 24

OBS: Depois que terminar de furar, pergunte se o cliente consegue ficar de pé ou se precisa de alguns minutos. Se o cliente se levantar e sentir tontura, ajude-o a se sentar e faça-o esperar de 3 a 5 minutos antes de sair.

Furo de Cartilagem

Se você estiver furando a área de cartilagem da orelha, é preciso tomar cuidado especial durante a perfuração e nos cuidados pós-perfuração.


Ao furar a cartilagem ao redor da borda da orelha, para os clientes com cartilagem muito grossa ou bem virada, você vai precisar puxar um pouco a cartilagem, para “desenrolar”. Esse procedimento serve para assegurar que o aparelho possa ficar posicionado corretamente.

Sempre que furar na área da cartilagem da orelha, tome cuidado para se certificar que o aparelho está perpendicular à superfície da orelha.

Avise ao seu cliente que a cicatrização da área de cartilagem vai demorar um pouco mais do que a da área do lóbulo.

Área de Cartilagem

É preciso cuidados especiais ao furar para essa parte (área vermelha à direita). Não fure através da “borda” enrolada da orelha.

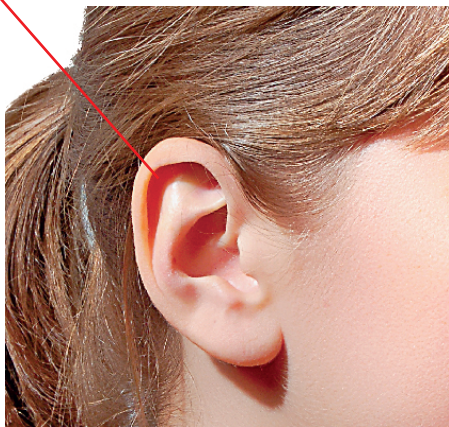

CUIDADOS APÓS A PERFURAÇÃO


O cuidado pós-perfuração é o fator mais importante para manter orelhas furadas saudáveis.

Os Brincos (para furar) não devem ser retirados por 4 a 6 semanas. As tarraxas não podem ficar muito apertadas contra o lóbulo.

Use solução antisséptica de sua preferência pelo menos duas vezes por dia, durante as primeiras 6 semanas do processo de cicatrização. Sem retirar os brincos, aplique a solução na frente e atrás de cada orelha, usando algodão embebido ou conta-gotas. Deslize os pinos para frente e para trás na orelha, com cuidado, para a solução entrar no buraco. Gire os pinos (como se desse corda em um relógio), duas ou três vezes por dia.

Use a solução antes de tomar banho, para proteger de spray de cabelo, sabão, xampu e outros produtos. Depois de tomar banho ou lavar os cabelos, as orelhas devem ser bem enxaguadas, e limpas com nova aplicação de solução antisséptica.

A solução deve ser usada diariamente para ajudar a prevenir a incidência de infecção. Mesmo depois que as orelhas já cicatrizaram, e se o cliente já estiver usando outros brincos, a solução deve ser usada regularmente, para manter as orelhas saudáveis e os brincos limpos.

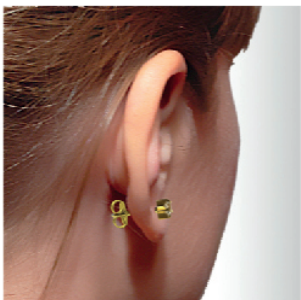

1 - Verifique os pinos quanto ao espaço.



2 - Não aperte muito a tarraxa ao brinco.



3 - Aplique a Solução na frente e atrás.



4 - Deslize o brinco para frente e para trás, para a solução penetrar no buraco.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A melhor maneira de estar preparado para qualquer problema que possa ocorrer durante a perfuração é ler esta seção ANTES do que possa ocorrer. Com alguns passos simples, você vai estar preparado para lidar com quase qualquer situação.

Em operação normal, o pino não é solto do adaptador, pois o mesmo não se prendeu a tarraxa.

1 - Se a tarraxa não fica presa e o pino continua no adaptador:

A. Segure o êmbolo com o polegar, pela parte de trás do botão do cursor. Isso evita que o brinco se mexa.

B. Certifique-se de que a tarraxa esteja colocada corretamente no encaixe apropriado.

C. Aperte o gatilho todo para trás até o fim.

D. Solte o Gatilho.

Normalmente isso vai fazer a tarraxa se prender ao brinco, e o pino vai se soltar do aparelho.

2 - Se o pino não tiver atravessado totalmente a orelha, ou se o procedimento acima não resolver o problema:

A. Embeba um pedaço de algodão com Solução antisséptica de sua preferência.

B. Remova o pino e aplique pressão na área furada com o algodão

C. Com um novo pino esterilizado, fure novamente através do mesmo buraco, como se fosse um primeiro furo. Siga os procedimentos de cuidados pós-perfuração.

OBS: Se precisar remover um brinco e furar novamente com um novo brinco, certifique-se de usar luva de látex descartáveis, e ter às mãos pedaços de algodão. Jogue fora as luvas, o algodão e os cotonetes usados de forma apropriada, após ter concluído a perfuração. Qualquer brinco aberto, mas não usado, deve ser jogado fora.



Central de Atendimento: (21) 2121-1950
sac@studex.com.br
www.studex.com.br